

WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSSGUIDE TILL ANDROID

KONTROLLERA PROGRAMVARUVERSIONEN


För att vara kompatibel med Beyond appen och Beyond hörapparaterna skall programvaran i din Android telefon vara **version 6.0.1 eller nyare**.

Det kan du enkelt kontrollera genom att följa dessa fyra steg. Var uppmärksam på att "platsinfo" måste vara aktiverat i din telefon för att appen ska kunna fungera.


1. Gå in i 'Inställningar'




2. Tryck på menypunkten 'Om enheten' *

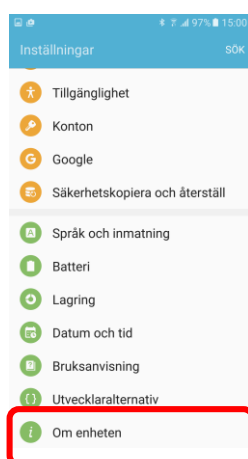


3. Tryck på menypunkten 'Programinfo'

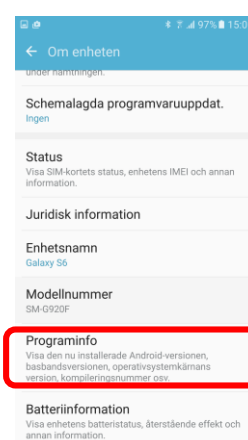

4. Kontrollera siffrorna under menypunkten 'Android version'. Det skall stå **6.0.1 eller högre**.

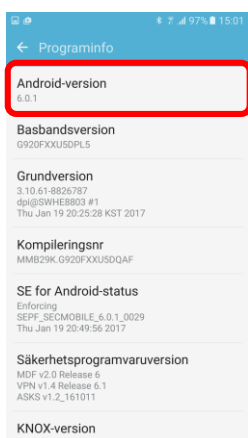

* **TIPS!** I menyn 'Om enheten' kan du välja att koppla in funktionen 'Hämta uppdateringar automatiskt', så säkerställer du att programvaran alltid är den senaste versionen.

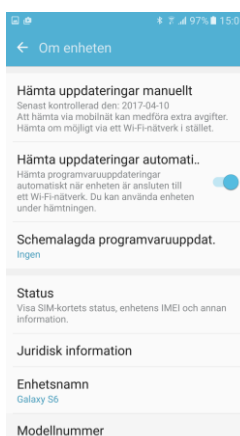

WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSSGUIDE TILL ANDROID


ANSLUT DINA BEYOND HÖRAPPARATER VIA BLUETOOTH

Innan du kan börja använda Beyond appen skall du ansluta dina hörapparater med telefonen via Bluetooth.


1. Gå in i 'Inställningar'



2. Tryck på menypunkten 'Bluetooth'


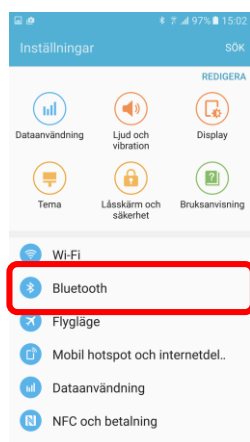


3. Kontrollera att Bluetooth är påslagen

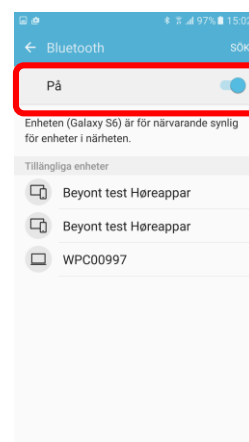

4. Under 'Tillgängliga enheter' bör du nu kunna se H+V Beyond hörapparat. För att ansluta skall du trycka på både H och V hörapparat i menyn.

5. När telefon och hörapparater är sammankopplade, ser man H+V under 'sammankopplade hörapparater'.

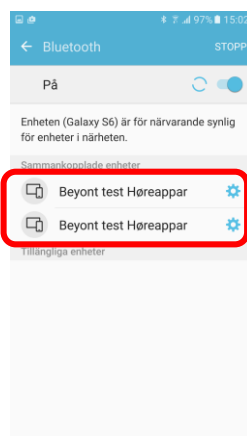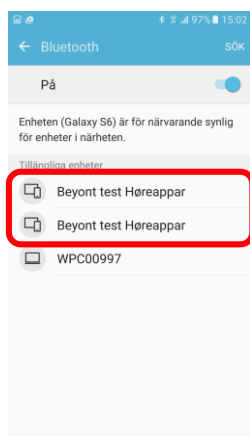


WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSSGUIDE TILL ANDROID


KOM I GÅNG MED BEYOND appen

När programvaran är uppdaterad och Beyond hörapparaterna är sammankopplade med telefonen, så kan du börja använda Beyond appen.

1. Gå in i 'Beyond' appen

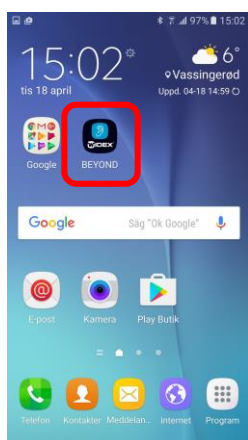

2. appen startar automatiskt att söka efter dina hörapparater

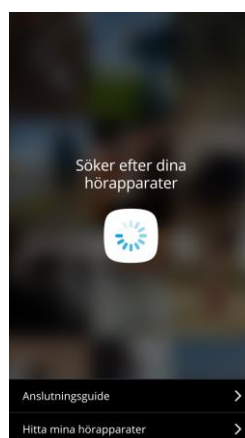

3. När appen har registrerat dina hörapparater kan du börja använda appen.

