


WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSGUIDE TILL iPhone

KONTROLLERA PROGRAMVARUVERSION


För att vara kompatibel med Beyond appen och Beyond hörapparaterna skall programvaran i din iPhone vara **iOS 10.0 eller nyare**.

Det kan du enkelt kontrollera genom att följa dessa fyra steg.

1. Gå in i 'Inställningar'

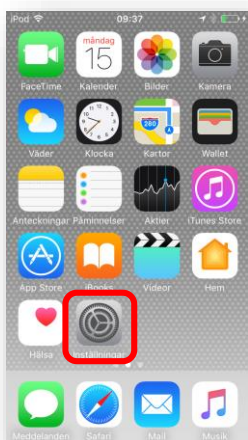

2. Tryck på menypunkten 'Allmänt'

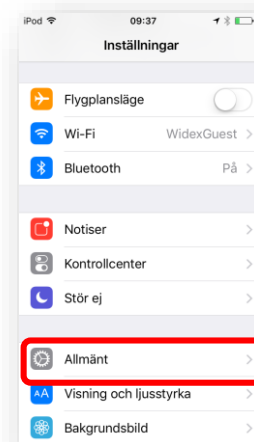


3. Tryck på menypunkten 'Om'



4. Kontrollera siffrorna efter 'Version'

Det skall stå **iOS 10.0 eller högre**

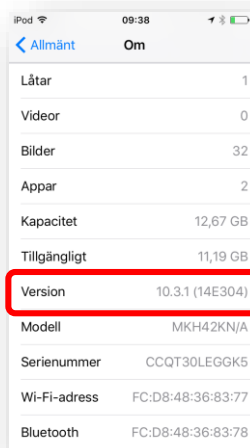


WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSGUIDE TILL iPhone


ANSLUT DINA BEYOND HÖRAPPARATER VIA BLUETOOTH

Innan du kan börja använda Beyond appen skall du ansluta dina hörapparater med telefonen via Bluetooth.


1. Gå in i 'Inställningar'

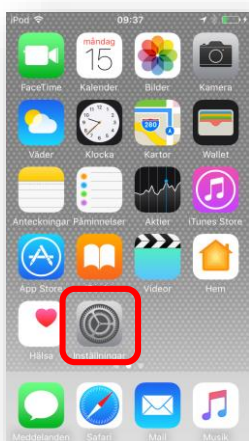


2. Kontrollera att Bluetooth är påslagen

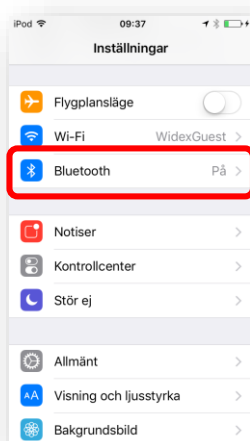


3. Tryck på menypunkten 'Allmänt'

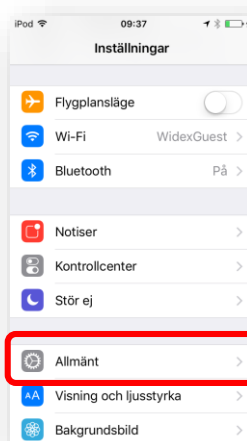


4. Tryck på menypunkten 'Hjälpmedel'

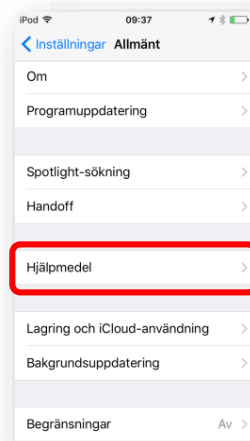


5. Tryck på menypunkten 'Hörapparater'

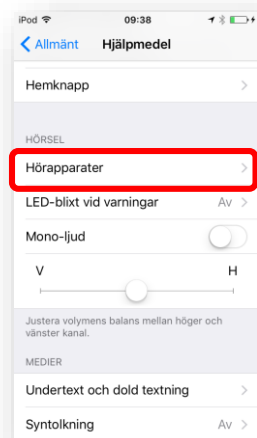


6. Under 'Enheter' bör det nu stå H+V Beyond hörapparater. För att ansluta dessa skall du trycka på fältet med texten.

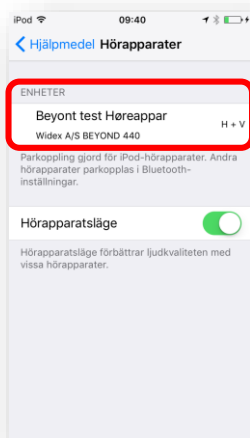

7. Då får du en förfrågan om parkoppling. OBS, detta sker 2ggr - 1 gång per apparat

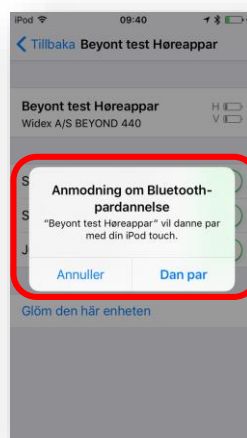

8. När parkopplingen är klar ser du H+V hörapparater och batteristatus.

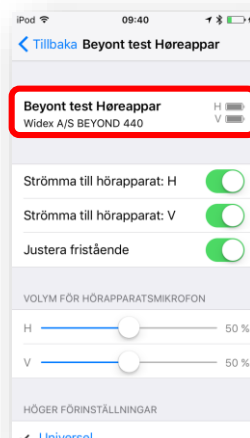


WIDEX BEYOND ANSLUTNINGSGUIDE TILL iPhone


KOM I GÅNG MED BEYOND APPEN

När programvaran är uppdaterad och Beyond hörapparaterna är sammankopplade med telefonen, så kan du börja använda Beyond appen.

1. Gå in i 'Beyond' appen

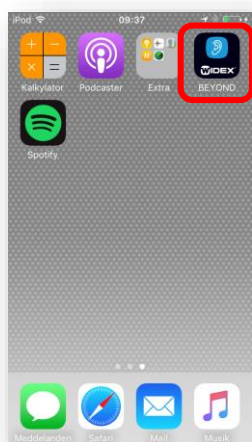

2. Appen startar automatiskt att söka efter dina hörapparater

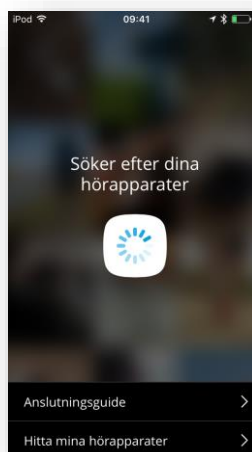

3. När appen har registrerat dina hörapparater kan du börja använda appen.

